



# CUSTOMER SERVICE REPORT

Parent Case Number:  
Case Number: 04584648  
Work Order Number: WO-07038962

Created Date: 2020/05/26  
Case type: Planned Maintenance  
Work Order type: Field Service

## お客様:

病院名: 国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院  
契約番号:

## 製品名:

システム名称: DISC PET/CT 600 MOTION  
システム No: MF0030  
シリアル No:  
Tube/Slice  
count:

## 作業内容:

現象: 定期点検 (スケジュール C)  
作業内容: 別紙「定期点検整備記録」に基づき実施致しました  
コンソール背面排気ファン交換致しました  
動作確認: テストスキャンにてシステムの正常動作を確認致しました

## 作業明細:

作業名	作業者名	作業者 No.	開始	終了	作業時間
Planned Maintenance	新井 資隆	502424663	2020/05/25 14:00	2020/05/25 19:30	5 : 30

## 部品明細:

貸出番号	部品番号	部品名	個	部品価格
306489775	5103238	Grease	1	
306635276	5124071	Fan, Tube Axial - 115VAC, 50-60Hz, 119mm x 119mm x 25mm x75cfm, ball bearing motor	4	

毎度格別のお引き立てを預かり厚くお礼申し上げます。  
今回上記作業を完了しましたので、ご確認下さるようお願い申し上げます。  
なお、修理の際取り外しました部品は品質改善の為持ち帰らせていただきますので、  
ご了承下さるようお願い申し上げます。  
フリーダイヤル 0120-055-919



SR180501

GE ヘルスケア・ジャパン株式会社  
認定保守代理店  
アクト・セン株式会社

WorkOrder Number : WO-07038962

Case Number : 04584648

WO-07038962 2020-05-26 9:09	WO-07038962 2020-05-26 9:09	WO-07038962 2020-05-26 9:09	WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13
WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13
WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13
WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13
WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13
WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13	WO-07038962 2020-05-26 9:13
TechnicianSignature				CustomerSignature			

本作業に契約時間を超える作業が含まれる場合は作業員からの説明をご確認の上、ご署名をお願いいたします。



SR180501

GEヘルスケア・ジャパン株式会社  
〒191-8503 東京都日野市旭が丘4-7-127



GE Healthcare

システム番号: MF0030  
サービス記録#: WO-07038962  
日付: 25May2020

**Optima 560, Discovery 600, Discovery 690 Elite PET/CT点検 チェックリスト - スケジュール C****Optima 560, Discovery 600, Discovery 690 Elite PET/CT PM CHECKLIST - Schedule C**お客様名: 国立がん研究センター中央病院 御中 サービス記録#: WO-07038962システム番号 / シリアル番号: MF0030 お客様機器名称: NAサービスマニュアル文書番号: 5322778-2EN ソフトウェアバージョン: kh\_xar.30.HP\_P\_G16\_点検周期: 9 ヶ月 点検 ステータス completeガントリー回転数: 2,209,077**コンソール  
CONSOLE**

点検確認事項 PM Task	手順 Procedure	結果 Results	コメント Comments
コンソール点検 Console Inspection	-	合格	

**CTガントリー  
CT GANTRY**

点検確認事項 PM Task	手順 Procedure	結果 Results	コメント Comments
メインベアリングの注油 Grease Main Bearing	-	非該当	171万回転時実施済み
スリップリングブラシ片の除去 Removing Slip Ring Brush Debris	-	合格	
DAS, ダクトファンフィルターの清掃 Clean DAS, Duct Fan Filters	-	合格	
Schleifringメンテナンス、ブラシ点検 Schleifring Maint, Inspect Brush	-	合格	

**CT高電圧  
CT HIGH VOLTAGE**

点検確認事項 PM Task	手順 Procedure	結果 Results	コメント Comments
X線管ヒートエクスチェンジャーの清掃 Clean Tube Heat Exchanger	-	合格	



GE Healthcare

システム番号 : MF0030

サービス記録#: WO-07038962

日付 : 25May2020

**PARC**

点検確認事項 PM Task	手順 Procedure	結果 Results	コメント Comments
PARC 点検 PARC PM	-	合格	

**テーブル  
TABLE**

点検確認事項 PM Task	手順 Procedure	結果 Results	コメント Comments
テーブルレールの注油 Grease Table Rails	-	合格	

**システム  
SYSTEM**

点検確認事項 PM Task	手順 Procedure	結果 Results	コメント Comments
エマージェンシーストップ操作の確認 Verify E-Stop Operation	-	合格	
スキャンコントロールプッシュボタンの確認 Check Scan Control Pushbuttons	-	合格	
サイトログの更新 Update Site Log	-	合格	

**終了処理  
FINALIZATION**

点検確認事項 PM Task	手順 Procedure	結果 Results	コメント Comments
PET デイリーQAチェック PET Daily QA Check	-	合格	
システムスキャンテスト 注釈: QAファン トムのシリアル#を"使用ツール"欄に入力 <b>System Scanning Test Note: Enter QA Phantom Serial # in "Tools Used" table.</b>	-	-	どのようなアーチファクトのタイプかを Series 1, 2, 3の"コメント"欄に記入する。 Enter any artifact types for Series 1, 2, and 3 scans in "Comments" below.



GE Healthcare

システム番号 : MF0030

サービス記録#: WO-07038962

日付 : 25May2020

点検確認事項 PM Task	手順 Procedure	結果 Results	コメント Comments
システムスキャンテスト System Scanning Test	シリーズ 1 (スカウト/オートボイス) Series 1 (Scout/ Auto Voice)	合格	
システムスキャンテスト System Scanning Test	シリーズ 2 (アキシヤル/チルト) Series 2 (Axial/Tilt)	合格	Tilt機能無しの為Axialのみ実施
システムスキャンテスト System Scanning Test	シリーズ 3 (ヘリカル/オートボイス) Series 3 (Helical/ Auto Voice)	合格	
システムスキャンテスト System Scanning Test	X線オン表示ランプ X-Ray ON Indicators	合格	

補記:

残り文字数:

使用ツール:

ツール説明 (メーカー名/型名)	シリアル番号	バーコード	校正期限日	
デジタルマルチメーター/FLUKE/179	84900335		31Aug2020	<div>ツールを追加</div> <div>ツールを削除</div>
QAファントム/GE/2144715	1004160			<div>ツールを追加</div> <div>ツールを削除</div>

GE 担当者:

Form Name: DOC1013117\_JA

Revision: 4

© 2013 General Electric Company  
All Rights Reserved.

ページ 3 / 4

MWS ID: DOC2153245

Revision: 1



GE Healthcare

システム番号 : MF0030  
サービス記録# : WO-07038962  
日付 : 25May2020

本点検完了FE数

1

FE 名 : 新井資隆  
SSO # : 502424663  
FEサービス記録# : WO-07038962

FE 署名 ...

mototaka arai

電子署名者 : mototaka arai  
日付 : 2020.05.25 18:54:52  
+09'00'

お客様署名 : ☐ はい ☒ 必要無し

☒ 点検完了の最終確認

\* 完了日 : 25May2020