



システム番号:  
サービス記録#:  
日付: 30Nov2020

Optima 560, Discovery 600, Discovery 690 Elite PET/CT点検 チェックリスト - スケジュール A  
Optima 560, Discovery 600, Discovery 690 Elite PET/CT PM CHECKLIST - Schedule A

お客様名: 国立がん研究センター中央病院 御中 サービス記録#: WO-07429803

システム番号 / シリアル番号: MF0030 お客様機器名称: PETCT C室

サービスマニュアル文書番号: 5322778-2EN ソフトウェアバージョン: kh\_xar.30

点検周期: 9 ヶ月 点検ステータス complete

ガントリー回転数: 2,362,034

コンソール

点検確認事項	手順	結果	コメント
コンソール点検	-	合格	

CTガントリー

点検確認事項	手順	結果	コメント
メインベアリングの注油	-	非該当	規定回転数に達していない為非該当
スリップリングブラシ片の除去	-	合格	
DAS, ダクトファンフィルターの清掃	-	合格	
Schleifringメンテナンス、ブラシ点検	-	合格	

CT高電圧

点検確認事項	手順	結果	コメント
X線管ヒートエクスチェンジャーの清掃	-	合格	

PARC

点検確認事項	手順	結果	コメント
PARC 点検	-	合格	

システム

点検確認事項	手順	結果	コメント
エマージェンシーストップ操作の確認	-	合格	
スキャンコントロールプッシュボタンの確認	-	合格	
サイトログの更新	-	合格	

終了処理

点検確認事項	手順	結果	コメント
PET デイリー QAチェック	-	合格	
システムスキャンテスト 注釈: QAファントムのシリアル#を“使用ツール”欄に入力	-	-	どのようなアーチファクトのタイプかを Series 1, 2, 3の “コメント”欄に記入する。
システムスキャンテスト	シリーズ 1 (スカウト/オートボイ	合格	
システムスキャンテスト	ア) シリーズ 2(アキシャル/チルト)	合格	
システムスキャンテスト	シリーズ 3 (ヘリカル/オートボイス)	合格	
システムスキャンテスト	X線オン表示ランプ	合格	

補記:

残り文字数:

使用ツール:

ツール説明 (メーカー名/型名)	シリアル番号	バーコード	校正期限日	
QA Phantom GE/2144715	1004160			<div>ツールを追加</div> <div>ツールを削除</div>

GE 担当者:

本点検完了FE数

1

FE 名: 鈴木駿介

SSO #: 212688254

FEサービス記録#: WO-07429803

FE 署名 ...

Shunsuke Suzuki

電子署名者: Shunsuke Suzuki  
日付: 2020.11.30 19:10:10  
+09'00'



システム番号:  
サービス記録#:  
日付: 30Nov2020

お客様署名: ☐ はい ☒ 必要無し

☒ 点検完了の最終確認

\* 完了日: 30Nov2020