



Optima 560, Discovery 600, Discovery 690 Elite PET/CT 点検 チェックリスト - スケジュール D

顧客情報

お客様名

国立研究開発法人国立がん研究センター中央病院 御中

サービス記録番号:

WO-07913151

システム番号/シリアル番号

MF0030

お客様機器名称:

PET検査室C

サービスマニュアル文書番号

5322778-2EN

ソフトウェアバージョン:

kh_xar.30

点検周期:

3か月毎



ガントリー回転数:

2573214

フォームの状態: ☒ 完了 ☐ 未完了

開始日

2021/08/30

国

JAPAN-JA



モダリティ

PET

スケジュール D

コンソール

点検項目	手順	結果	コメント
コンソール点検	-	完了	

CTガントリー

点検項目	手順	結果	コメント
------	----	----	------

点検項目	手順	結果	コメント
スリップリングブラシ片の除去	-	完了	
DAS, ダクトファンフィルターの清掃	-	完了	
Schleifringメンテナンス、ブラシ点検	-	合格	

CT HIGH VOLTAGE

点検項目	手順	結果	コメント
X線管ヒートエクスチェンジャーの清掃	-	完了	
HHSスキャン	-	合格	
高電圧タンク帰還抵抗確認	-	合格	
メーター確認	-	合格	

PETガントリー

点検項目	手順	結果	コメント
ソースリングlubリケータの交換	-	完了	
Elevator Lead Screw Driveの注油	-	完了	

点検項目	手順	結果	コメント
Source Loader Screw Drive の注油	-	完了 	

PARC

点検項目	手順	結果	コメント
PARC 点検	-	合格 	

テーブル

点検項目	手順	結果	コメント
トランスポーターベアリン グ、ボールスクリュー の注油	(2年毎)	非該当 	昨年実施済みの為、 非該当

システム

点検項目	手順	結果	コメント
エマージェンシーストッ プ操作の確認	-	合格 	
スキャンコントロールプ ッシュボタンの確認	-	合格 	
サイトログの更新	-	完了 	

終了処理

点検項目	手順	結果	コメント
PET デイリー QA チェック	-	合格 	

点検項目	手順	結果	コメント
システムスキャンテスト 注釈：QAファントムのシリアル#を“使用ツール”欄に入力	-	-	シリーズ 1、2、3のスキヤンのアーティファクト・タイプを下の「補記」欄に入力する。
システムスキャンテスト	シリーズ 1（スカウト/オートボイス）	合格	
システムスキャンテスト	シリーズ 2（アキシヤル/チルト）	合格	
システムスキャンテスト	シリーズ 3（ヘリカル/オートボイス）	合格	
システムスキャンテスト	X線オン表示ランプ	合格	

コメント、ツール、添付ファイル

コメント 文字 2000

使用ツール

ツール詳細

シリアル番号

バーコード

校正期限日

X線アナライザー

CB2-18080562

2022/05

取
外
し

ツール詳細

シリアル番号

バーコード

校正期限日

デジタルマルチ

20240309

2022/07

追
加

添付ファイル

ファイル選択

選択されていません

GE 担当者

作業者数

1



名前:

三川 大輔

SSO # :

305026237

サービス記録#

WO-07913151

完了日

2021/08/30

フォームの完了 ☒

お客様署名

☐ Yes ☒ Not Required

フォームの送信

現在のフォームを保存

フォームの検証

フォームの消去