



システム番号: MF0030  
サービス記録#: WO-07854750  
日付: 24May2021

Optima 560, Discovery 600, Discovery 690 Elite PET/CT点検 チェックリスト - スケジュール C

Optima 560, Discovery 600, Discovery 690 Elite PET/CT PM CHECKLIST - Schedule C

お客様名: 国立がん研究センター中央病院 御中 サービス記録#: WO-07854750

システム番号 / シリアル番号: MF0030 お客様機器名称: PET C室

サービスマニュアル文書番号: 5322778-2EN ソフトウェアバージョン: kh\_xar.30.HP\_P\_G16

点検周期: 3 ヶ月 点検 ステータス complete

ガントリー回転数: 2,493,063

コンソール  
CONSOLE

点検確認事項 PM Task	手順 Procedure	結果 Results	コメント Comments
コンソール点検 Console Inspection	-	合格	

CTガントリー  
CT GANTRY

点検確認事項 PM Task	手順 Procedure	結果 Results	コメント Comments
メインベアリングの注油 Grease Main Bearing	-	非該当	規定回転数以下の為実施不要
スリップリングブラシ片の除去 Removing Slip Ring Brush Debris	-	実施	
DAS, ダクトファンフィルターの清掃 Clean DAS, Duct Fan Filters	-	実施	
Schleifringメンテナンス、ブラシ点検 Schleifring Maint, Inspect Brush	-	合格	

CT高電圧  
CT HIGH VOLTAGE

点検確認事項 PM Task	手順 Procedure	結果 Results	コメント Comments
X線管ヒートエクスチェンジャーの清掃 Clean Tube Heat Exchanger	-	実施	

## PARC

点検確認事項 PM Task	手順 Procedure	結果 Results	コメント Comments
PARC 点検 PARC PM	-	合格	

## テーブル TABLE

点検確認事項 PM Task	手順 Procedure	結果 Results	コメント Comments
テーブルレールの注油 Grease Table Rails	-	実施	

## システム SYSTEM

点検確認事項 PM Task	手順 Procedure	結果 Results	コメント Comments
エマージェンシーストップ操作の確認 Verify E-Stop Operation	-	合格	
スキャンコントロールプッシュボタンの確認 Check Scan Control Pushbuttons	-	合格	
サイトログの更新 Update Site Log	-	合格	

## 終了処理 FINALIZATION

点検確認事項 PM Task	手順 Procedure	結果 Results	コメント Comments
PET デイリーQAチェック PET Daily QA Check	-	合格	
システムスキャンテスト 注釈：QAファントムのシリアル#を“使用ツール”欄に入力 <b>System Scanning Test Note:</b> Enter QA Phantom Serial # in "Tools Used" table.	-	-	どのようなアーチファクトのタイプかを Series 1, 2, 3の“コメント”欄に記入する。 Enter any artifact types for Series 1, 2, and 3 scans in "Comments" below.

点検確認事項 PM Task	手順 Procedure	結果 Results	コメント Comments
システムスキャンテスト System Scanning Test	シリーズ 1 (スカウト/オートボイス) Series 1 (Scout/ Auto Voice)	合格	
システムスキャンテスト System Scanning Test	シリーズ 2 (アキシヤル/チルト) Series 2 (Axial/Tilt)	合格	
システムスキャンテスト System Scanning Test	シリーズ 3 (ヘリカル/オートボイス) Series 3 (Helical/ Auto Voice)	合格	
システムスキャンテスト System Scanning Test	X線オン表示ランプ X-Ray ON Indicators	合格	

補記 :

残り文字数 :

使用ツール :

ツール説明 (メーカー名/型名)	シリアル番号	バーコード	校正期限日	
				<div>ツールを追加</div> <div>ツールを削除</div>

GE 担当者 :

本点検完了FE数

1



システム番号 : MF0030  
サービス記録# : WO-07854750  
日付 : 24May2021

FE 名 : 三川大輔  
SSO # : 305026237  
FEサービス記録# : WO-07854750

FE 署名 ...

三川 大輔	電子署名者 : 三川 大輔 日付 : 2021.05.24 20:11:58 +09'00'
-------	--

お客様署名 : ☐ はい ☒ 必要無し

☒ 点検完了の最終確認

\* 完了日 : 24May2021